

コロナ対策に！  
緊急時の応急処置

スターオブライフ認証商品

# 酸素缶



携帯用濃縮酸素 **carriable + immediate effect**

消費期限  
**5年**  
業界最長

大容量  
**5ℓ**  
使用回数  
50~60回  
(2秒/1回)

高濃度  
**95%**  
医療用  
酸素マスクと  
同等



直径 65 mm × 高さ 245 mm

VIGO 酸素缶

1628 円 (税込) (12 本 / 箱の時) ~



### 疲れ・貧血・立ちくらみ



老廃物の排除や、  
コリをほぐします。

### エコノミー症候群・災害時避難



窮屈な姿勢時や  
火災時、煙からの避難。

### コロナ対策



医療用酸素不足の  
補助として

### 集中力低下・あくび



血流を促進し、脳を  
リフレッシュします。

### 二日酔い



酸素はアルコール  
成分を分解します。

### 居眠り運転



酸素は眠気を防止  
します。

### 息切れ・高山病



呼吸・心拍数の  
安定に役立ちます。



スターオブライフとは、1973年に  
アメリカで生まれた世界が認める  
救急救命のシンボルマークです



救急車にも  
スターオブライフの  
マークが！

携常用濃縮酸素

酸素缶

carriable + immediate effect

\* oxygen can  
concentrated

## 酸素缶のパワーの秘密

酸素缶には高濃度酸素が充填されています。

高濃度酸素とは、空気中の酸素濃度 21% よりも高い割合で濃縮された酸素の事です。


自然界には存在しない、濃度の濃い酸素で、医療で使われている酸素マスクは、約 90% の高濃度酸素が使われています。

酸素缶も同様の約 90% の高濃度酸素のため、効果が期待できます。

いざという時に  
誰でも簡単に！

## 【使用方法】

1.

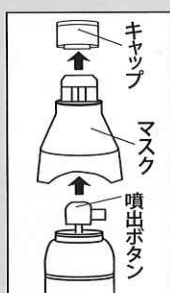


本体からキャップとマスクを取り外します。

2.



A の6つの穴が下に向くように、マスクを噴出ボタンの吹出口に差し込みます。

3.

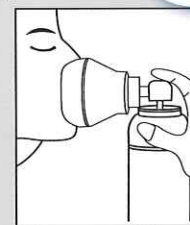

マスクを口元にあて、噴出ボタンを押しながら、酸素を吸入してください。

|      |                    |              |                                  |
|------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 商品名  | 携帯濃縮酸素 酸素缶         | 使用回数         | 0 ~ 60 回 (2 秒 / 回使用の場合)          |
| サイズ  | 直径 65mm × 高さ 245mm | 納品荷姿 サイズ     | 横 232mm × 高さ 264mm<br>× 奥行 307mm |
| 酸素濃度 | 95%                | 納品荷姿 重量      | 2.212kg                          |
| 充填量  | 5 リットル             | (1 箱 12 本入り) |                                  |

製造・販売元

ビーゴ メディカル

VIGO MEDICAL 株式会社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-11-10 第2SSビル2F

T:03-6661-7030 / F:03-6661-7032

<https://www.vigo-medical.com>〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-27-9  
ジュネスマチダ202

株式会社 KANKYU

代表取締役 立花 寛久

TEL&amp;FAX 04-2946-8783